

STEPP

Telemonitoraggio multiparametrico



TELEMONITORAGGIO

Lo **STEPP** è un sistema di **telemonitoraggio** dei parametri vitali del paziente (saturazione, temperatura, ECG, peso, pressione) **interconnesso** e per la prima volta **integrato** con il software di gestione **Oyster**.



VANTAGGI

- **Connettività**

I dispositivi comunicano direttamente con il gateway che invia le trasmissioni automaticamente alla piattaforma di gestione OYSTER

- **Monitoraggio completo**

Grazie alla molteplicità dei dispositivi disponibili, si possono ottenere informazioni dettagliate e specifiche sulla salute del paziente

- **Semplicità**

Grazie alla loro progettazione i dispositivi sono semplici da utilizzare

- **Personalizzazione**

I dispositivi possono essere assegnati in base alle particolari esigenze del medico o del paziente



DISPOSITIVI INTEGRATI



SATURIMETRO



TERMOMETRO



ECG RECORDER



MISURATORE PRESSIONE



BILANCIA

- **WORKFLOW**

Il paziente effettua autonomamente le misurazioni con i vari dispositivi, collegati via Bluetooth con il gateway fornito. I dati vengono trasmessi automaticamente ed è possibile visualizzarli tramite la **piattaforma OYSTER**.



- **OYSTER**

OYSTER ECG-Manager è una piattaforma web-based completa che offre **supporto** agli operatori sanitari nella **gestione** dei dispositivi per telemonitoraggio, **migliorando** l'assistenza ai pazienti a domicilio.

La piattaforma ha lo scopo di supportare il monitoraggio da remoto dei segnali ECG e STEPP, **ricevendo e archiviando** i dati provenienti dai dispositivi e offrendo la possibilità di redigere il **referto**.



ASSEGNAZIONI

- Durata monitoraggio
- Dispositivi assegnati
- Dati paziente e medico
- Numero e tipo di trasmissioni ricevute
- Azioni sulle trasmissioni

OYSTER
ECG & More

TORNA ALL'ADMIN

ASSEGNAZIONI 5


PAZIENTI 8

MEDICI 3

DISPOSITIVI ECG 5

STEPP 4

UTENTI 8


+39 049 7800837
ecg@eumaco.it
www.eumaco.it
























Assegnazioni

+ NUOVA ASSEGNAZIONE

IN CORSO

TERMINATE

RICERCA AVANZATA

Attivo dal	Termina il	Dispositivo	Paziente	Medico	N. Trasmissioni	Avanzamento	Notifica
12-07-2019	14-07-2019	SN: 8401501154 - 100IR STEPP: ST0001	Verdi Francesco	Franco Rossi	ecgs: 31 (15 Non lette) Pressione (0) Temperatura (1)	0 Nuove 348 gg passati	    
12-07-2019	28-07-2019	SN: 8401501104 - 3100BT	Marrone Enrico	Franco Rossi	ecgs: 8 (7 Non lette) Pressione (0) Temperatura (1)	0 Nuove 334 gg passati	    
22-06-2020	26-06-2020	SN: 8521901362 - nuovo STEPP: STePP_0002	Giabardo Antonio	Franco Rossi	ecgs: 0 Pressione (15) SpO2 (16) Peso (8) Temperatura (1)	0 gg passati	    
23-06-2020	27-06-2020	SN: 1221 - 100IR STEPP: STePP_0003	Giabardo Antonio	Franco Rossi	ecgs: 0 SpO2 (0) Peso (0) Temperatura (0)	1 gg mancanti	   
26-06-2020	28-06-2020	-- STEPP: STePP_0004	Marrone Enrico	Franco Rossi	ecgs: 0 SpO2 (0) Peso (0) Temperatura (0)	2 gg mancanti	   

per pagina: 10

TRASMISSIONE


1. Dati paziente
2. Refertazione
3. Suddivisione delle trasmissioni
4. Risultati delle trasmissioni

The screenshot displays the OYSTER ECG & More web application interface. The left sidebar contains navigation links: TORNA ALL'ADMIN, ASSEGNAZIONI (4), PAZIENTI (4), MEDICI (3), DISPOSITIVI ECG (8), STEPP (4), and UTENTI (8). The main content area is titled 'Mostra trasmissioni' and includes a breadcrumb 'Assegnazioni'. The interface is divided into four numbered sections:

- 1. Dati paziente:** Patient information for Francesco Verdi, born 01-06-1965, monitored by Franco Rossi from 12-07-2019 to 14-07-2019. ECG S.N.: 8401501154, STEPP S.N.: ST0001, Annotazioni: annotazione22, Patologie: patologia.
- 2. Referto finale:** A section for the final report, currently showing 'il paziente non presenta disturbi'. It includes buttons for 'MODIFICA IL REFERTO FINALE' and 'SCARICA REFERTO'.
- 3. Suddivisione delle trasmissioni:** A filter bar for ECG, PRESSIONE, SP02, PESO, and TEMPERATURA. It includes checkboxes for 'TUTTE', 'Già lette', 'Ancora da leggere', 'Aggiunte al referto', 'Evidenziati', and 'Non evidenziati'. A dropdown menu shows 'Ordina per Evidenziate'.
- 4. Risultati delle trasmissioni:** A list of ECG transmissions. The first entry is from 25 novembre 2016 10:15 +0100, recorded at 10:13, with a referto of 'teste'. The second entry is from 06 aprile 2016 19:19 +0200, recorded at 19:17, with a referto of '+ Inserisci annotazione'. Both entries show ECG waveforms and a 'Pagine: 2' indicator.

DATI TRASMISSIONE

1. Valori numerici in ordine di arrivo
2. Rappresentazione grafica
3. Gestione dei dati per la refertazione

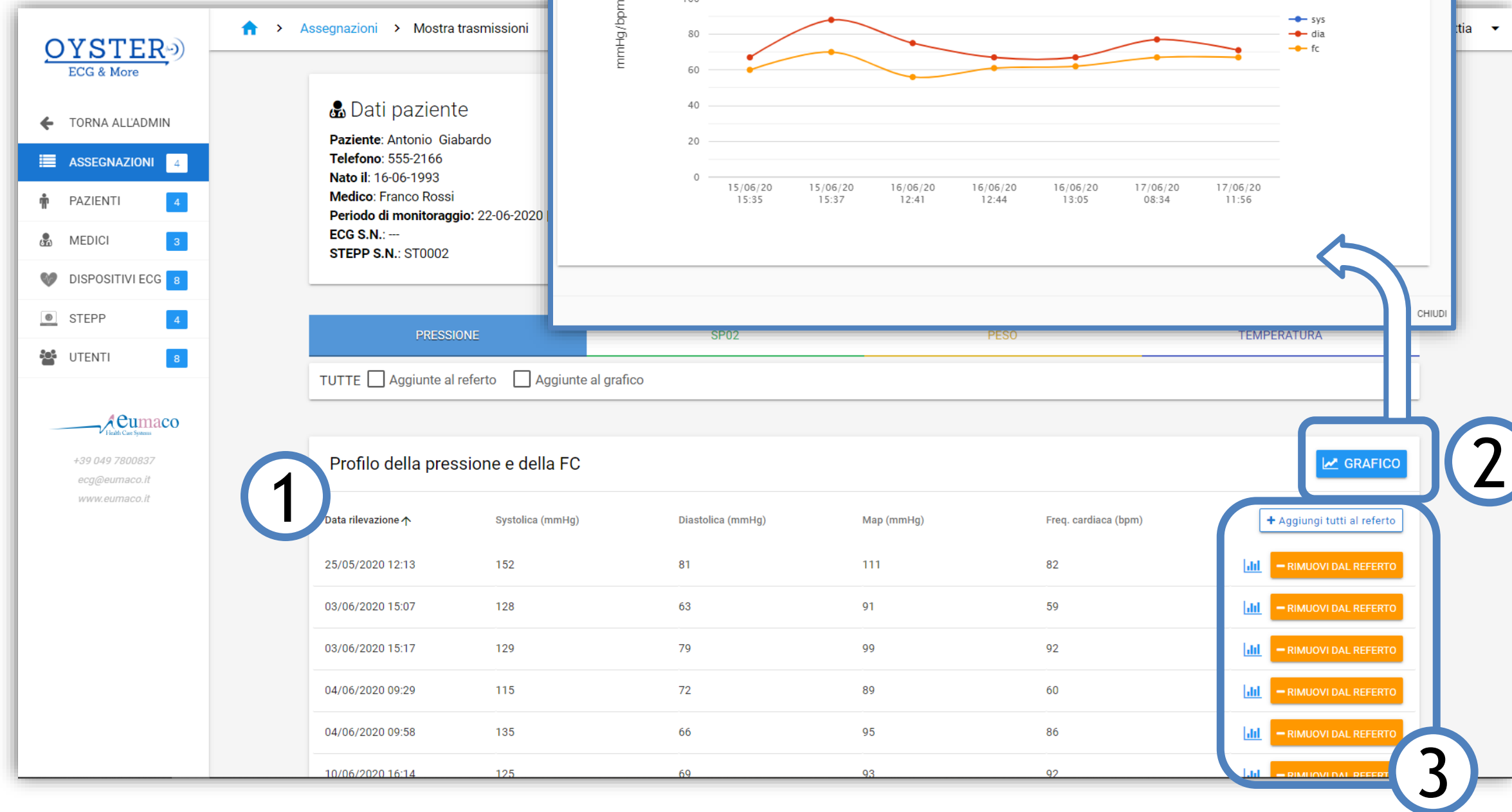

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- **ECG**

Monitoraggio esclusivo del segnale ECG attraverso CM100 XT o PM100

- **STEPP**

Monitoraggio di tutti i parametri (Saturazione, Temperatura, ECG, Pressione, Peso)

- **CUSTOM**

Monitoraggio personalizzabile a seconda delle richieste:

- Termometro
- Saturimetro
- Misuratore di pressione
- Misuratori INR (coagulazione)
- Bilancia
- Spirometro
- Misuratore glicemia



STEPP



Grazie per l'attenzione
Per maggiori informazioni contattaci a info@eumaco.it





Viale Regione Veneto 19 - 35127, Padova (PD)



Tel: +39 049 7800837



Fax: +39 049 760528



E-mail: info@eumaco.it



Seguici su Facebook



Seguici su LinkedIn